

NORMA Face Shield

Valmistajan tiedot NORMA Distribution Center GmbH
Henkilösuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukainen
Versio: 28.05.2020

Valmistaja: NORMA Distribution Center GmbH, Unterm Ohmberg 24, 34431 Marsberg, Saksa



Ohjeet:

1. Varastointi: Suojavisiiri on varastoitava huoneenlämmössä kuivassa ja suljetussa paikassa.

2. Käyttö: Ennen kuin NORMA-visiiri kiinnitetään NORMA-sankaan, visiirin molemmilla puolilla olevat suojakalvot on ehdottomasti poistettava. Suojakalvo on toisella puolelta vihreä ja toiselta puolelta läpinäkyvä. Vihje: Teippi helpottaa suojakalvojen irrotusta. Kiinnitä teipinpala kalvon reunaan, niin että se menee hieman reunan yli. Vedä sitten irti. Kiinnitä visiiri napsauttamalla sen reiät sangan tappeihin. Laita visiirin yläosan takareunat molemmilla puolilla pienten sivusankojen alle. Visiiriä ei tarvitse säätää käyttäjälle.

Suosittellemme, että edellä mainittua tuotetta käytetään vain kerran. Ammattimaisen ja kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivan puhdistuksen ja desinfiointin jälkeen tuotetta voidaan tarvittaessa käyttää useampia kertoja. Huomautamme turvallisuussyistä, että tämä suositus ei ole sitova eikä sitä ole varmistettu tai sertifioitu. Käyttäjän vastuulla on testata, mitkä puhdistus- ja desinfiointiprosessit ja -toimenpiteet ovat sopivia ja välttämättömiä toistuvaa käyttöä varten, jotta tuotteen aiottuun käyttötarkoitukseen vaadittavat ominaisuudet säilyvät tai ne saavutetaan. Tämä pätee erityisesti silloin, jos tuotteitamme työstetään, yhdistetään tai asennetaan muutoin.

3. Puhdistus ja desinfiointi: Visiiri voidaan puhdistaa mikrokuituliinalla. Desinfiointiin voidaan käyttää tavanomaisia aineita.

4. Huolto ja tarkastus: Henkilösuojain on tarkastettava ennen käyttöä. On suositeltavaa, että viallinen henkilösuojain (esim. naarmuuntunut visiiri) vaihdetaan uuteen.

Henkilönsuojaimen ominaisuudet:

1. Tämä silmiensuojain suojaa nestepisaroilta ja -roiskeilta. Se vähentää siten pisaratartunnan vaaraa. Suojaus viruksia, bakteereja ja muita biologisia aineita vastaan on rajallinen tuotteen rakenteen vuoksi.
2. Tuote ei suojaa mekaanisilta vaikutuksilta.
3. Tuotetta voidaan käyttää yhdessä suojamaskien ja suojalasien kanssa.
4. Hävitettävä käytön jälkeen! Uudelleenkäyttö käyttäjän oman harkinnan mukaan.

Lisävarusteet:

Sanka ja visiiri ovat saatavana erillisinä osina jakelukumppanilta. Niiden NORMA-osanumerot ovat seuraavat: NORMA-sanka: 0700 8701 000; NORMA-visiiri: 0700 8702 000.

Henkilösuojaimen vanhentumisaika:

henkilösuojaimen säilyvyysaika on enintään 5 vuotta.

Pakkaustyypit:

kuljetukseen ei vaadita tiettyä pakkaustyyppeä, visiiri on suojattu molemmiin puoliin suojakalvoilla.

Merkintöjen selitykset:

NDC CE

1. NDC = valmistajan lyhenne,
NORMA Distribution Center GmbH
2. CE = CE-merkintä

Ilmoitettu laitos:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Saksa (ilmoitetun laitoksen numero: 0196).

Yhdenmukaistamislainsäädäntö:

1. Asetus (EU) 2016/425
2. Direktiivi 2001/95/EY
3. EN 166:2001

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen verkko-osoite:

http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/Landing-NORMA-Face-Shield_EN

Kaikki tiedot valmistajan riskinarvioinnin perusteella:

1. Tämä silmiensuojain ei suojaa mekaanisilta vaikutuksilta.
2. Tämä silmiensuojain ei suojaa säteilyltä (esim. auringonsäteet, UV, hitsaus, infrapunasäteily).
3. Tämä silmiensuojain on tarkoitettu käytettäväksi vain huoneenlämmössä.
4. Tämä silmiensuojain ei ole tulenkestävä.
5. Terävät reunat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
6. Vaurioitunutta silmiensuojainta ei saa käyttää, sillä se vaikuttaa näkyvyyteen ja suojaukseen.
7. Jos silmiensuojain on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa.
8. Silmiensuojain on hävitettävä käytön jälkeen. Uudelleenkäyttö käyttäjän oman harkinnan mukaan.
9. Tämä silmiensuojain ei suojaa aggressiivisilta nesteiltä.

NORMA Distribution Center GmbH



How do you like our NORMA Face Shield?
Do you have any questions or comments?

We are happy to receive your feedback: norma.to/faceshield

